

Anlage 2

Blutprobeentnahme beim Wildschwein

Gebrauchsanweisung Kabevette® Schweißentnahmesystem bei Schwarzwild

Grund: Verschmutzung und Verunreinigung der Schweißproben soll vermieden werden, da die Proben sonst nicht auswertbar sind.

Blutentnahmesystem



Enthalten im Set:

- ✓ rote Kabevette® mit weißer Verschlusskappe (EDTA)
- ✓ Versandhülse
- ✓ Einsendeschein



• Entfernen der Verschlusskappe
(#Wichtig: Kappe nicht wegschmeißen!)

• Herzkammer oder ein geschlossenes Gefäß eröffnen und das Blut langsam aufziehen



• Jetzt die Kolbenstange abbrechen, die Verschlusskappe aufsetzen, die Barcodedublette abziehen und das Blutröhrchen in die Versandröhre stecken



• Barcodedublette auf den Untersuchungsantrag kleben und diesen vollständig ausfüllen

Wichtig:
Angaben zur Herkunft der Probe